

### Asiantuntijasi kustomoituun kuulonsuojaukseen:

Din specialist för skräddarsydda hörselskydd:

[Empty dotted box for specialist name]

Etu- ja sukunimi | För- och efternamn: .....

### Sopivuus ja toiminta testattu:

Lämplighet och funktions testade:

Päivämäärä | Datum ..... Allekirjoitus | Underskrift .....


Tutustu erilaisiin CUSTOMFIT kuulon- ja melunsuojaus- tuotteisiin osoitteessa [www.orelo.fi](http://www.orelo.fi)

Upptäck de olika typerna av CUSTOMFIT hörsel och ljudskydd produkter på [www.orelo.fi](http://www.orelo.fi)



Siiликкуја 1 | 00800 Helsinki | Finland

8503 | 1221 v.1.8 | Orelo™

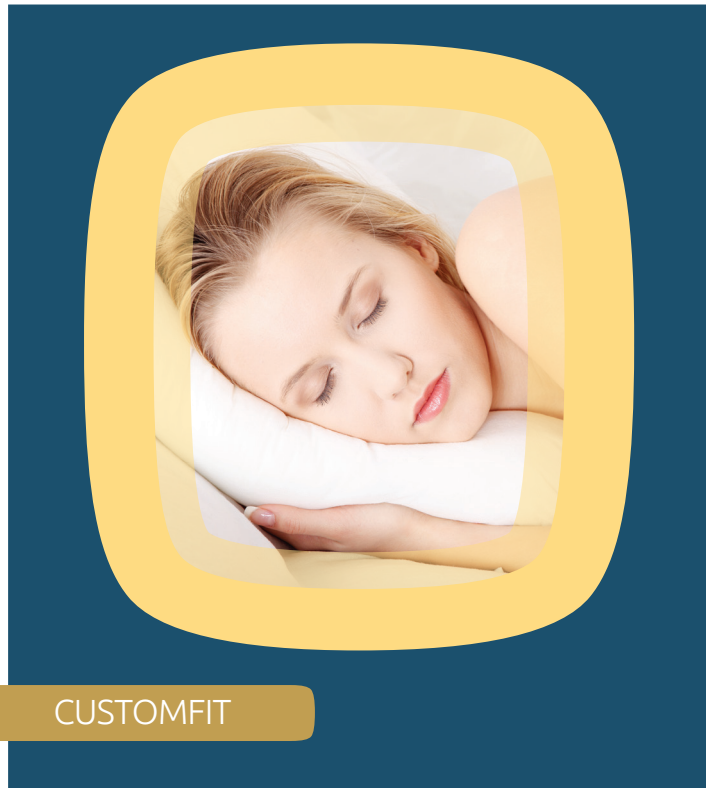

CUSTOMFIT

Orelo sleep



## CUSTOMFIT Orelo sleep

### Muotoiltua suojausta melulta.

Erikoisvalmisteisten CUSTOMFIT Orelo sleep -suojaimet on valmistettu pidettäväksi nukkumisen aikana.

### Oikea käyttö

Ota suojaimeen kahvasta kiinni peukalolla ja etusormella ja käännä kuulonsuojain korvakäytävään kevyesti painaen kunnes se istuu mukavasti paikallaan.

*TÄRKEÄÄ: Kuulonsuojain jossa on punainen merkintä tai R-kirjain ennen sarjanumeroa kuuluu oikeaan korvaan!*

### Käyttöohjeet

Tämä kuulonsuojain antaa täyden suojauksensa vain silloin, kun sitä käytetään aina melualtistuksen aikana. Ilman tätä, suojaus voi heiketä merkittävästi. Kuulonsuojaimen istuvuus on hyvä tarkistuttaa säännöllisesti, sillä korvakäytävän muutokset tai vauriot saattavat vaikuttaa kuulonsuojaimen tiiveyteen. Mikäli muutokset ovat suuria, kuulonsuojaimet tulisi uusia.

Unihäiriöt ovat yksi yleisimmistä syistä alentuneeseen työtehoon. Keskeytyksetön uni ja hiljainen nukkumisympäristö ovat sinulle tärkeitä; Orelo Sleep ei kuitenkaan eliminoi aivan kaikkia ympäristön ääniä ja tälle syynä:

- Turvallisuuden takia on tärkeää voida kuulla esimerkiksi soiva puhelin.
- On fyysisesti mahdotonta tarjota täydellistä äänieristystä.
- Täydellinen äänieristys saattaa kasvattaa ääniherkkyyttä ja tehdä rauhallisesta unesta vaikeampaa

### Säilytys ja huolto

Säilytä kuulonsuojaimiasi mukana tulevassa kotelossa alle +55°C lämpötilassa. Puhdista kuulonsuojaimet jokaisen käyttökerran jälkeen. Poista korvavahajäämät mukana tulevalla työkalulla.

### Puhdistus ja hoito

Tutustu **oto-fresh** -tuotteisiin Orelo-suojaimeen optimaaliseen puhdistukseen ja hoitoon! Saatavana kuulonsuojauksen ammattilaiselta. helppo käyttää | pitkäaikainen vaikutus | optimaalinen hoito

*Tämä tuote voi olla herkkä tietyille kemiallisille aineille.*

## CUSTOMFIT Orelo sleep

### Ljudskydd med speciell formgivning.

Specialiserade CUSTOMFIT Orelo sleep skydd är gjorda för sovning.

### Korrekt användning

Ta handtaget mellan tummen och pekfingeret och vrid pluggen i hörselgången tills den sitter bekvämt.

**VIKTIGT:**

*Skyddet med de röda märkningarna eller R före serienumret är för höger öra!*

### Användningsinstruktioner

Ljudskyddet bör användas alltid under ljudexponering för att ge sin fulla skyddsfunktion. Om inte denna anvisning följs kan skyddet försämrars allvarligt. Kontrollera regelbundet hos din audionom funktionsskyddet och att ljudkyddet sitter korrekt eftersom skador eller förändringar i hörselgången kan göra tätningen mindre effektiv. I detta fall bör ljudskyddet förnyas.

- Sömnstörningar är en av de mest frekventa orsaker till låg effektivitet i arbete. Ostörd sömn och tyst sovmiljö är viktigt för dig, men Orelo Sleep eliminerar inte alla ljud; visa ljud ska höras för gott skäl:
- Av säkerhetsskäl är det viktigt att vara kunna höra betydande ljud, t.ex. en ringande telefon.
  - Det är fysiskt omöjligt att ge komplett ljudisolerung.
  - Kompletta ljudisolerung kan öka känslighet och gör fridfull sömn även svårare.

### Förvaring och skötsel

Förvara ditt ljudskydd i det medföljande fodralet. Rengör dina ljudskydd efter varje användning. Ta bort eventuella rester av öronvax med hjälp av den medföljande plaststickan.

### Rengöring och vård

Beakta dig med våra **oto-fresh** -produkter för optimal rengöring och vård av dina Orelo ljudskydd! Finns hos dina Orelo-återförsäljare. lätt att hantera | långvarig effekt | optimal skötsel

*Denna produkt kan vara känslig för vissa kemikalier.*

