


Asiantuntijasi kustomoituun kuulonsuojaukseen:

Din specialist för skräddarsydd hörselskydd:

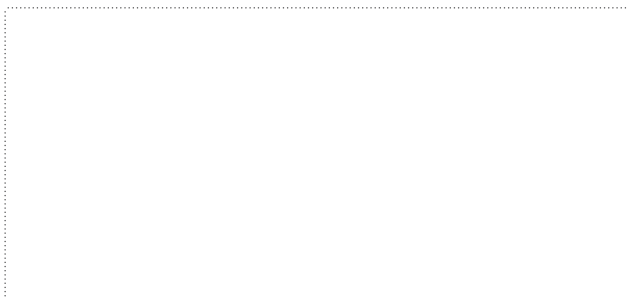

Etu- ja sukunimi | För- och efternamn:

Sopivuus ja toiminta testattu:

Lämplighet och funktions testade:

Päivämäärä | Datum
Allekirjoitus | Underskrift

Tutustu erilaisiin CUSTOMFIT kuulon- ja melunsuojaus-
tuotteisiin osoitteessa www.orelo.fi

Upptäck de olika typerna av CUSTOMFIT hörsel och ljudskydd produkter på www.orelo.fi



Sillikuja 1 | 00800 Helsinki | Finland

8504 | 1221 v.1.8 | Orelo™



CUSTOMFIT

Orelo swim



CUSTOMFIT Orelo swim

Muotoiltua suojausta melulta.

Erikoisvalmisteisten CUSTOMFIT Orelo swim -suojaimet on valmistettu uinnin aikana pidettäviksi.

Oikea käyttö

Ota suojaimeen kahvasta kiinni peukalolla ja etusormella ja käännä kuulonsuojain korvakäytävään kevyesti painaen kunnes se istuu mukavasti paikallaan.

TÄRKEÄÄ: Kuulonsuojain jossa on punainen merkintä tai R-kirjain ennen sarjanumeroa kuuluu oikeaan korvaan!

Käyttöohjeet

Tämä kuulonsuojain antaa täyden suojauksensa vain silloin, kun sitä käytetään aina melualtistuksen aikana. Ilman tätä, suojaus voi heiketä merkittävästi. Kuulonsuojaimen istuvuus on hyvä tarkistuttaa säännöllisesti, sillä korvakäytävän muutokset tai vauriot saattavat vaikuttaa kuulonsuojaimen tiiveyteen. Mikäli muutokset ovat suuria, kuulonsuojaimet tulisi uusia.

Säilytys ja huolto

Säilytä kuulonsuojaimiasi mukana tulevassa kotelossa alle +55°C lämpötilassa. Puhdista kuulonsuojaimet jokaisen käyttökerran jälkeen. Poista korvavahajäämät mukana tulevalla työkalulla.

Puhdistus ja hoito

Tutustu **oto-fresh** -tuotteisiin Orelo-suojaimeen optimaaliseen puhdistukseen ja hoitoon! Saatavana kuulonsuojauksen ammattilaiselta. helppo käyttää | pitkäaikainen vaikutus | optimaalinen hoito

Tämä tuote voi olla herkkä tietyille kemiallisille aineille.

CUSTOMFIT Orelo swim

Ljudskydd med speciell formgivning.

Specialiserade CUSTOMFIT Orelo swim skydd är gjorda för simning.

Korrekt användning

Ta handtaget mellan tummen och pekfingeret och vrid pluggen i hörselgången tills den sitter bekvämt.

VIKTIGT:

Skyddet med de röda märkningarna eller R före serienumret är för höger öra!

Användningsinstruktioner

Ljudskyddet bör användas alltid under ljudexponering för att ge sin fulla skyddsfunktion. Om inte denna anvisning följs kan skyddet försämrans allvarligt. Kontrollera regelbundet hos din audionom funktionsskyddet och att ljudskyddet sitter korrekt eftersom skador eller förändringar i hörselgången kan göra tätningen mindre effektiv. I detta fall bör ljudskyddet förnyas.

Förvaring och skötsel

Förvara ditt ljudskydd i det medföljande fodralet. Rengör dina ljudskydd efter varje användning. Ta bort eventuella rester av öronvax med hjälp av den medföljande plaststickan.

Rengöring och vård

Beakta dig med våra **oto-fresh** -produkter för optimal rengöring och vård av dina Orelo ljudskydd! Finns hos dina Orelo-återförsäljare. lätt att hantera | långvarig effekt | optimal skötsel

Denna produkt kan vara känslig för vissa kemikalier.

